

# Návod na použití: Zdravotnické Roušky

Roušky jsou **jednorázový zdravotnický materiál** třídy 1, typu II nebo IIR, slouží k běžnému nošení ve specifických provozech na základě jejich určení a není možné je ošetřovat nebo opakovaně používat.

**Nasazení:** Před nasazením roušky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. Rouškou si zakryjte nos a ústa a upevněte pomocí elastických šňůrek kolem uší.\* Během nošení se roušky nedotýkejte; pokud tak učíníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje vyměnit roušku za novou, jakmile je vlhká.

**Sejmutí:** Roušku sundávejte zezadu (nedotýkejte se přední části); poté ji ihned vyhodte do uzavřeného koše; očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. Likvidace: S použitou rouškou zacházejte jako s infekčním odpadem.

## Použití jednorázové roušky:



01 Před nasazením si umyjte ruce



02 Masku uchopte ve správné pozici



03 Přetáhněte gumičky přes uši



04 Stáhněte masku přes ústa



05 Stikněte nosní klip pro lepší přilnavost



06 Nedotýkejte se přední strany masky



07 Před sejmutím si umyjte ruce



08 Masku sejměte ze zadu za gumičky



09 Poté masku vhodte do koše



10 Použijte dezinfekci na ruce

Datum výroby a datum expirace výrobku naleznete na originálním balení produktu.  
Distribucí produktu zajišťuje v EU společnost Medispark s.r.o.

**MEDI SPARK**  
HEALTHCARE