

# Návod na použití: Ústenky

Ústenky jsou **jednorázový ne zdravotnický materiál** třídy 1, typu I, slouží k běžnému použití, ale není možné je ošetřovat nebo opakovaně používat.

Nasazení: Před nasazením ústenky si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. Ústenkou si zakryjte nos a ústa a upevněte pomocí elastických šňůrek kolem uší.\* Během nošení se ústenky nedotýkejte; pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje vyměnit ústenku za novou, jakmile je vlhká.

Sejmutí: Ústenku sundávejte zezadu (nedotýkejte se přední části); poté ji ihned vyhoďte do uzavřeného koše; očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou.

## Použití jednorázové ústenky:



01  
Před nasazením si umyjte ruce



02  
Masku uchopte ve správné pozici



03  
Přetáhněte gumičky přes uši



04  
Stáhněte masku přes ústa



05  
Stikněte nosní klip pro lepší přilnavost



06  
Nedotýkejte se přední strany masky



07  
Před sejmutím si umyjte ruce



08  
Masku sejměte ze zadu za gumičky



09  
Poté masku vhodte do koše



10  
Použijte dezinfekci na ruce

Datum výroby a datum expirace výrobku naleznete na originálním balení produktu.  
Distribucí produktu zajišťuje v EU společnost Medispark s.r.o.

**MEDI SPARK**  
HEALTHCARE