

# Návod na použití: Respirátory

Respirátory jsou **jednorázový ne zdravotnický materiál** třídy 1, typu I, slouží k běžnému použití, ale není možné je ošetřovat nebo opakovaně používat.

Nasazení: Před nasazením respirátoru si očistěte ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. Respirátorem si zakryte nos a ústa a upevněte pomocí elastických šňůrek kolem uší.\* Během nošení se respirátorem nedotýkejte; pokud tak učiníte, očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou. WHO (Světová zdravotnická organizace) doporučuje vyměnit ústenku za novou, jakmile je vlhká.

Sejmutí: Respirátor sundávejte zezadu (nedotýkejte se přední části); poté jej ihned vyhodte do uzavřeného koše; očistěte si ruce dezinfekcí na bázi alkoholu nebo mýdlem s vodou.

## Použití jednorázového respirátoru:



01 Před nasazením si umyjte ruce



02 Masku uchopte ve správné pozici



03 Přetáhněte gumičky přes uši



04 Stáhněte masku přes ústa



05 Stikněte nosní klip pro lepší přilnavost



06 Nedotýkejte se přední strany masky



07 Před sejmutím si umyjte ruce



08 Masku sejměte ze zadu za gumičky



09 Poté masku vhodte do koše



10 Použijte dezinfekci na ruce